

Demande d'analyse Western Blot pour le diagnostic de la Besnoitiose

Laboratoire de référence de la Besnoitiose

Anses – Laboratoire Santé Animale de Maisons-Alfort

❖ Exigences techniques

- Le test Western Blot se fait sur sérum. Les prélèvements sanguins doivent être effectués sur tube sec sans anticoagulant.
- Le prélèvement doit avoir un degré d'hémolyse acceptable afin de réaliser l'analyse.
- Un volume minimum de 100µl est demandé.
- En cas d'envoi de plusieurs prélèvements, chaque prélèvement doit être facilement identifiable et convenablement étiqueté ou marqué.
- Il est recommandé d'inclure des pains de glace dans le colis surtout en période de forte chaleur ou dans le cas d'un long acheminement vers le LR (plus de 2 jours)

❖ Procédure de la demande d'analyse à BIPAR-ANSES

- 1- Remplir le commémoratif de la demande d'analyse en renseignant les cases concernées par les données analytiques (par le laboratoire) et les données épidémiologiques (par le GDS ou le demandeur).
- 2- Joindre obligatoirement une copie du commémoratif à vos prélèvements. Le colis est à envoyer à l'adresse suivante :

Unité BIPAR
Anses – Laboratoire Santé Animale
14, rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort cedex

❖ Délais de réalisation de l'analyse et le rendu des résultats

- Le test Western Blot sera réalisé dans un délai maximum de 2 semaines à réception des prélèvements.
- Le rapport des résultats sera envoyé uniquement par courriel aux adresses mails renseignées dans le commémoratif.